



Questo software aiuta a visualizzare  
e memorizzare i dati dai dispositivi EMG NeuroTrac®

### **Impossibile completare l'installazione**

Se viene visualizzato un messaggio di errore durante l'installazione dei componenti del prodotto, ciò potrebbe essere dovuto ad aggiornamenti di sistema Windows incompleti o in sospeso. Laddove Windows richiede che gli aggiornamenti vengano completati, o ci sono troppi aggiornamenti nell'elenco "in sospeso", ciò potrebbe interferire con le installazioni presenti sul computer finché non si eseguono tutti gli aggiornamenti di sistema.

Per risolvere questo problema, accedi al tuo pannello di controllo, digita "aggiorna" e seleziona "Windows Update". Scarica e installa tutti gli aggiornamenti dall'elenco, in particolare quelli relativi a .NET, C ++ e DirectX. Una volta fatto ciò, riavvia il computer ed esegui di nuovo l'installazione. Ti assicuriamo che ciò non influirà sui dati già installati, come gli accessi e il database dei pazienti.