



Questo software aiuta a visualizzare  
e memorizzare i dati dai dispositivi EMG NeuroTrac®

## Requisiti di installazione

### Requisiti di sistema:

- **Sistemi supportati:** Windows Vista / 7/8 / 10. Windows 10 è consigliato. Evita Windows XP perché non è più supportato da Microsoft e perché il software NeuroTrac è adatto per le ultime piattaforme Windows. **Apple Mac, iPad, Windows RT non sono supportati.** Tuttavia, puoi utilizzare [Parallels](#) sul tuo Apple Mac per eseguire questo software.
- **Hardware:** qualsiasi nuovo PC o laptop con un'accelerazione grafica standard o buona. Il sistema suggerito dispone di 2 porte USB e dispone di un microprocessore Intel Core i3 (o i5, i7 o più), ha almeno 2G di RAM e spazio disponibile sull'HDD. L'applicazione utilizzerà 100 MB dopo l'installazione, mentre il database e i backup potrebbero occupare altri 2 GB.

Assicurati che l'adattatore di alimentazione del tuo laptop sia dotato di un terzo pin "Ground" sulla spina che collega la rete all'adattatore di alimentazione. Se l'adattatore di alimentazione ha solo 2 pin, la mancanza del pin di messa a terra può produrre interferenze elettriche che influenzano le letture EMG.

- **Tablet Windows:** tieni presente che i tablet Windows più economici hanno un sistema Windows RT. Questa è una versione mobile di Windows che non è compatibile con questo software per PC in quanto mancano componenti cruciali. **I tablet con Windows 8 Pro o Windows 10 saranno sempre compatibili**, un esempio di tale tablet è la piattaforma Microsoft Surface 1/2/3, che utilizza Windows 8 Pro.